

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης – περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ορθή χρήση του προϊόντος. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε ρωτήστε τον φαρμακοποιό, τον γιατρό σας ή επικοινωνήστε μαζί μας

BAUSCH + LOMB

Artelac® Ectoin®

0,2% υαλουρονικό οξύ (ως υαλουρονικό νάτριο), 2% Ectoin®, χλωριούχο νάτριο, υδροξείδιο του νατρίου (ως ρυθμιστικό pH) και νερό για ενέσιμα.

Προβλεπόμενη χρήση: Υποστηρικτική θεραπεία και πρόληψη των συμπτωμάτων της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας, ανακούφιση ερεθισμένων ματιών από φλεγμονή και καταπραϊντική λίπανση των ματιών που υποφέρουν από ξηροφθαλμία.

Τι είναι το Artelac® Ectoin®;

Το Artelac® Ectoin® είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο περιέχει την ουσία Ectoin®, ένα φυσικό κύτταρο-προστατευτικό μόριο με ιδιότητες μείωσης της φλεγμονής και μεμβρανο-σταθεροποιητικές ιδιότητες και υαλουρονικό οξύ, ένα φυσικό μόριο που ανακουφίζει το μάτι χάρη στα υδρόφιλα και σταθεροποιητικά χαρακτηριστικά του. Δεν περιέχει ρυθμιστικά διαλύματα.

Η προηγμένη σύνθεσή του διαθέτει πολύ υψηλή ανεκτικότητα καθώς είναι απαλλαγμένη από συντηρητικά.

Πού χρησιμοποιείται το Artelac® Ectoin®;

Το Artelac® Ectoin® είναι ένα ισότονο διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία και πρόληψη των συμπτωμάτων της εποχιακής και χρόνιας αλλεργικής επιπεφυκίτιδας που οφείλεται π.χ. στη γύρη, τα ακάρεα σκόνης, το τρίχωμα των ζώων ή τη μούχλα. Το αίσθημα κνησμού, ο ερεθισμός, η ερυθρότητα και η δακρύρροια των ματιών μπορούν να μειωθούν αποτελεσματικά, καθώς η καταπραϊντική λίπανσή τους τα ανακουφίζει. Το Artelac® Ectoin® μειώνει τη φλεγμονή του επιπεφυκότα εξαιτίας χημικών-φυσικών ερεθισμάτων μέσω μη φαρμακευτικής δράσης και ενυδατώνει τους οφθαλμούς που παρουσιάζουν από μέτριες έως σοβαρές μορφές ξηροφθαλμίας, ακόμα και με συμπτώματα φλεγμονής.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Artelac® Ectoin®;

Το Artelac® Ectoin® σταθεροποιεί τη φυσική δακρυϊκή στοιβάδα με δύο τρόπους: το υαλουρονικό οξύ έχει θετική δράση στο υδατίνο στρώμα της και το Ectoin® ενδυναμώνει το λιπιδικό της στρώμα. Αυτός ο διττός τρόπος δράσης προστατεύει το μάτι από τις βλαβερές επιρροές των αλλεργιογόνων ουσιών, καθώς και άλλων εξωγενών παραγόντων και υποστηρίζει τη διαδικασία ανάπλασης του ερεθισμένου και ευαίσθητου επιπεφυκότα. Το Artelac® Ectoin® δεν περιέχει συντηρητικά και είναι κατάλληλο για χρήστες φακών επαφής και για άτομα με ευαίσθητα μάτια.

Πόσο συχνά και για πόσο καιρό πρέπει να χρησιμοποιείτε

το Artelac® Ectoin®;

Ενσταλάξτε 1-2 σταγόνες από το Artelac® Ectoin® στο μάτι σας μόλις αισθανθείτε την ανάγκη. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση και όσο συχνά θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια χρήσης.

Απορρίψτε την αμπούλα μονοδόσης μετά τη χρήση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Artelac® Ectoin®:

1. Διαχωρίστε προσεκτικά μια αμπούλα μονοδόσης από την σειρά




2. Στρέψτε (μην τραβήξετε) το άνω καπάκι της αμπούλας.



3. Γείρετε ελαφρά το κεφάλι σας προς τα πίσω και τραβήξτε απαλά προς τα κάτω το κάτω βλέφαρό σας με ένα δάχτυλο του ελεύθερου χεριού σας. Κρατήστε την αμπούλα όσο πιο κατακόρυφα μπορείτε πάνω απ' το μάτι σας με το στόμιο στραμμένο προς τα κάτω. Αποφύγετε την επαφή της αμπούλας με το μάτι σας για να αποτρέψετε πιθανό τραυματισμό.

Στη συνέχεια πιέστε ελαφρά την αμπούλα για να ενσταλάξετε μία-δύο σταγόνες.

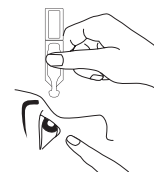

Έπειτα κλείστε το μάτι σας και κινήστε το ελαφρά για να απλωθεί η σταγόνα βέλτιστα στην επιφάνεια του ματιού.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Artelac® Ectoin®;

Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση του Artelac® Ectoin®

- Έχουν γίνει σπάνιες αναφορές για αντιδράσεις τοπικής υπερευαισθησίας/ερεθισμού. Η αγωγή σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να διακόπτεται. Εάν αισθανθείτε επίμονη ενόχληση ή ερεθισμό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει προσωρινή θόλωση της όρασης μετά την ενστάλαξή του στο μάτι, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οδήγηση οχημάτων ή το χειρισμό μηχανημάτων.
- Μην ακουμπάτε την άκρη της αμπούλας στην επιφάνεια των ματιών σας για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.
- Περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο προϊόν για τα μάτια.
- Να μην επαναχρησιμοποιείται.
- Η επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος ενέχει πιθανό κίνδυνο μόλυνσης για τον χρήστη.
- Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.

336

936

336

936

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία ή η αμπούλα μονοδόσης είναι κατεστραμμένη.
- Το Artelac® Ectoin® αποτελείται από μικρά πλαστικά μέρη που θα μπορούσαν να καταποθούν από μικρά παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας. Επομένως, το Artelac® Ectoin® πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Το Artelac® Ectoin® είναι κατάλληλο για χρήση με μαλακούς και σκληρούς φακούς επαφής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένα.
- Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εγκύους, θηλάζουσες γυναίκες και παιδιά.
- Εάν το παιδί σας αντιμετωπίζει ξηροφθαλμία, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε λιπαντικό για τα μάτια.

Πώς να αποθηκεύσετε το Artelac® Ectoin®;

Να φυλάσσεται θερμοκρασία μεταξύ 2 - 25°C. Κρατήστε το μακριά από τον ήλιο.

Απόρριψη:

Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.















Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή.

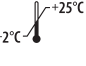Διαθέσιμες συσκευασίες:

Το Artelac® Ectoin® διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 20 αμπούλες μονοδόσεων με 0,5 ml οφθαλμικό διάλυμα. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην αγορά όλες οι συσκευασίες.

Το προϊόν διατίθεται και σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων χωρίς συντηρητικά.

Επεξήγηση συμβόλων

 0483 Αξιολόγηση συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Σήμα CE με αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού	 Αποστειρώθηκε χρησιμοποιώντας τεχνικές ασηπτικής επεξεργασίας και συσκευάζεται σε ένα ενιαίο αποστειρωμένο σύστημα φραγμού	 Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης (για σημαντικές προειδοποιήσεις/προφυλάξεις)
 Κατασκευαστής: Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165/173 13581 Berlin, Γερμανία www.bausch.com	 Όριο θερμοκρασίας φύλαξης  Κρατήστε το μακριά από τον ήλιο  Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία ή η αμπούλα μονοδόσης είναι κατεστραμμένη	 Κωδικός παρτίδας  Ημερομηνία κατασκευής  Ιατροτεχνολογικό προϊόν  Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης  Ημερομηνία λήξης  Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής GTIN (01) αναγνωριστικό συσκευής EXP (17) ημερομηνία λήξης (μορφή: εεμμη) LOT (10) αριθμός παρτίδας  Να μην επαναχρησιμοποιείται. Παρακαλούμε απορρίψτε το εναπομείναν υγρό

Το Ectoin® είναι εμπορικό σήμα της Bitop AG. Όλοι οι άλλοι όροι που φέρουν τους εκθέτες ®/™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Bausch & Lomb Incorporated ή των θυγατρικών της

Artelac Ectoin I227EU-04, ημερομηνία αναθεώρησης 2023-09

© 2023 Bausch & Lomb Incorporated ή οι θυγατρικές της